


Receptor para cama

Conexiones pines

1. Cómo conectar el receptor BJ en la cama

Para conectar el receptor:

1. Nosotros podemos enviar el receptor sin los cables conectados. En ese caso les daremos una lista de los pines y el color del cable que tiene conectado. P.ej.

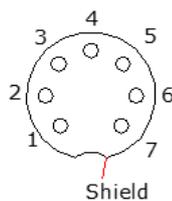


Vista frontal pines conector macho

1. Azul
2. Rojo
3. Verde
4. Amarillo
5. Gris
6. Negro
7. Naranja

“Shield” (carcasa metálica): lila

2. En el interior del receptor encontrarán 4 conectores. Cada conector corresponde a un movimiento de la cama según la siguiente tabla:

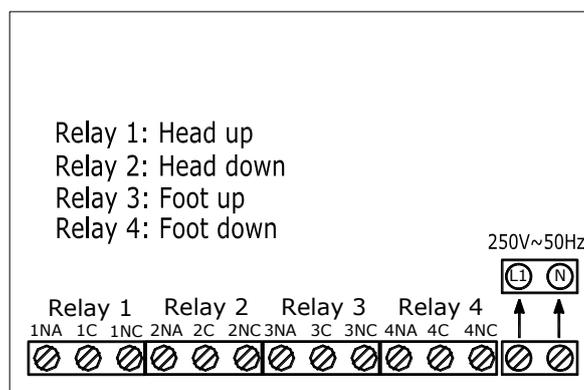


3. Como el “reference point” es común a todos los movimientos, entregaremos todos los conectores 1C, 2C, 3C y 4C unidos. El cable que esté asociado al pin de “Reference point” se debe conectar al conector 1C.




Receptor para cama

Conexiones pines

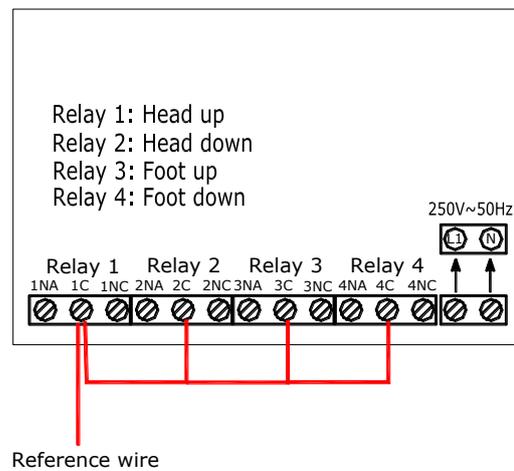

4. Por último hay que conectar los 4 cables de los 4 movimientos de la cama en los conectores 1NA, 2NA, 3NA, 4NA.

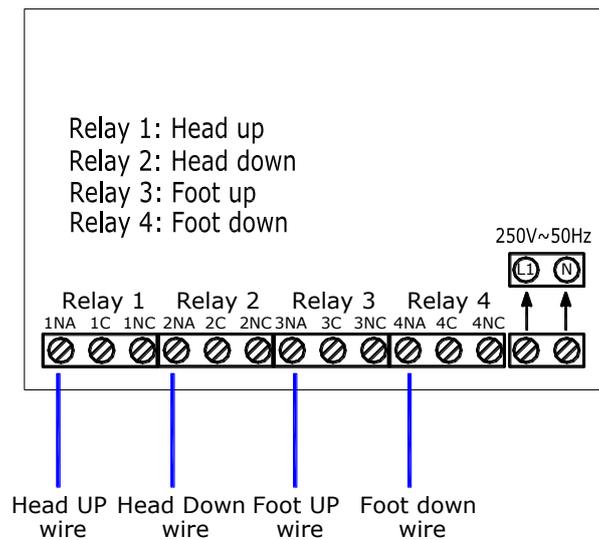

El resto de cables se deben proteger y se dejan sin conectar.